

## 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

РШ 1.1 НЬЮ МДН - ручка электрошпателя со встроенным штыревым нагревателем для насадок\* НС х.0 НЬЮ с разъемом "MDN" на конце кабеля. Может использоваться с ЭШЗ МОДИС ранних выпусков для сопряжения с насадками НС х.0 НЬЮ.

РШ 1.1 НЬЮ ТЮЛЬПАН - ручка электрошпателя со встроенным штыревым нагревателем для насадок\* НС х.0 НЬЮ с разъемом "тюльпан" на конце кабеля, совместима с БМ 2.0 ЭКО ПРОФИ, УСМФ 1.0 МАСТЕР, ЭШЗ 1.4/1.5 как с ранее выпущенными моделями, так и вновь выпускаемыми.




### Комплектность

Ручка электрошпателя деревянная (1)

РШ 1.1 НЬЮ МДН / ТЮЛЬПАН

Ключ для снятия насадок (2)

Этикетка АВЕ 623.090.001 ЭТ

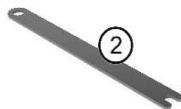

Поставка по дополнительной заявке

✉ - Насадка НС х.0 НЬЮ

✉ - Держатель кисточек, инструментов ХОЛДЕР 2.0 ТУЛЗ

Для большего удобства при работе рекомендуется держатель ХОЛДЕР 2.0 ТУЛЗ.

\* - Насадка в комплект не входит

## 2 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ


Остерегаться прикосновения к нагретым рабочим насадкам.

Запрещается разбирать ручку электрошпателя.

Запрещается вставлять ручку электрошпателя в вентиляционные щели блока управления воскотопки/электрошпателя (**ВТ/ЭШ**).

При размещении моделировочного ножа исключить возможность касания разогретой рабочей насадкой сетевого провода **ВТ/ЭШ**.

### Инструкция по установке или замене съемных насадок НС х.0 НЬЮ на РШ 1.1 МДН/ТЮЛЬПАН

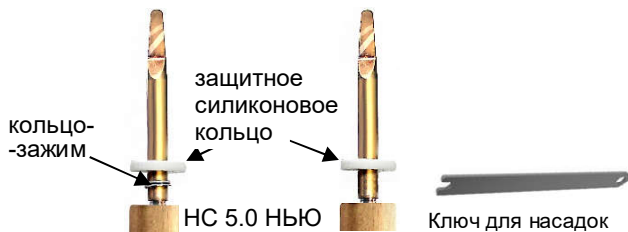

Менять насадки только в горячем состоянии.

Для смены насадки НС х.0 НЬЮ использовать ключ для снятия насадок. Съем и установку насадки производить возвратно-поступательными движениями вдоль оси моделировочного ножа, избегая вращения и покачивания. При необходимости более плотной посадки поджать хвостовую часть насадки, сняв ее.

Не прижимать защитное силиконовое кольцо вплотную к торцу ручки во избежание перегрева ее корпуса.

### **3 ГАРАНТИИ**

Срок гарантии на ручку и кабель — 6 месяцев при отсутствии видимых механических повреждений.