

Идеальное
внесение!

AH Plus^{Jet}[®]
Root Canal Sealing Material



AH TempTM
Calcium Hydroxide-Based Root Canal Dressing

НОВИНКА!



Перейти в магазин ЭльДент и заказать:

AH TempTM

Временный пломбировочный материал на основе
гидроксида кальция для корневых каналов

- Точное внесение в
корневой канал
- Оптимизированные условия хранения
- Доказанная совместимость с AH Plus

К лучшей стоматологии

DENTSPLY

АН Темп™ характеризуется эффективной дезинфекцией корневых каналов, легко вносится благодаря удобным канюлям АН Темп™


Цель эндодонтического лечения: эффективная дезинфекция корневых каналов

АН Темп™ высокощелочная паста на основе гидроксида кальция с антибактериальными свойствами и уровнем pH 12

Оптимизированные условия хранения

- ✓ меньше блокировка канюль во время внесения
- ✓ меньше блокировка материала в шприце со временем
- ✓ меньше потерь материала из-за засыхания материала в шприце


Стабильность консистенции во время лечения¹

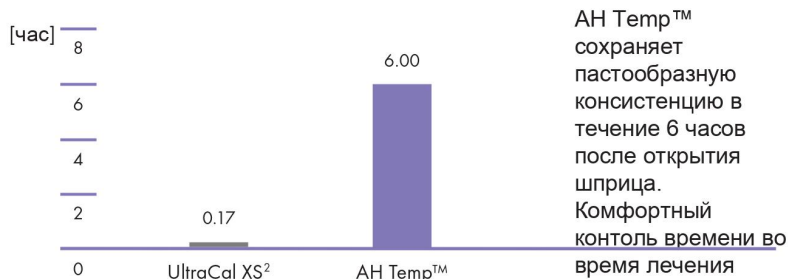

В ежедневной практике АН Темп™ может использоваться на протяжении 3 месяцев после открытия



Отличная рентген контрастность - залог надежного рентген контроля¹

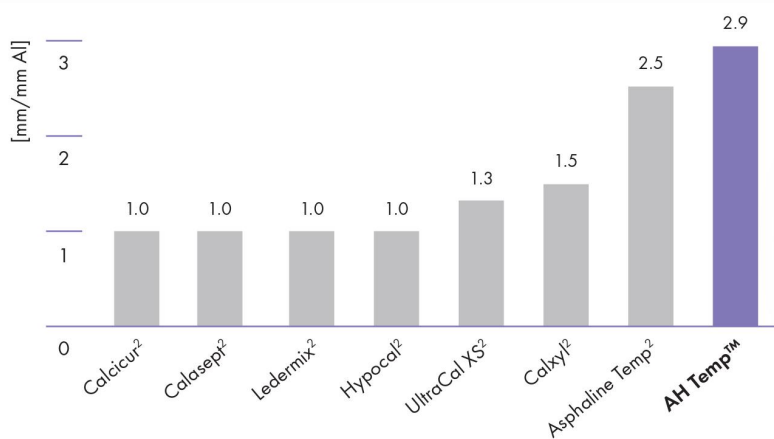

¹Данные по запросу.

² Незарегистрированная торговая марка DENTSPLY International, Inc.

Прямое и точное внесение в корневой канал

Изгиб 45°

Рабочая длина 25 мм

Внешний диаметр 0.41 мм

“Вносить АН Temp™ очень удобно. Это лучший временный материал, который сейчас доступен. В добавок имеет очень удобную форму канюли!”

Др. Матиас Дж. Роггендорф,
Университет Марбурга,
Германия




АН Temp™ канюля



Calxyl² канюля

Доказанная совместимость с АН Plus

Сила адгезии АН Plus к дентину¹

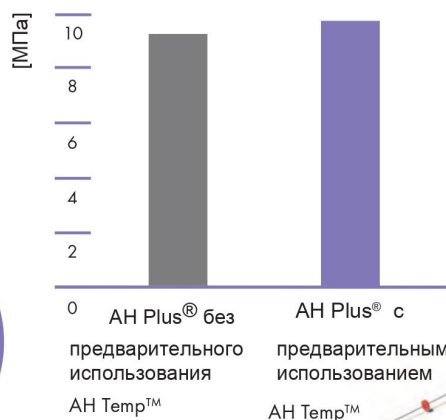

АН Temp™ в комбинации с АН Plus® – идеальное сочетание временного материала и силера для корневых каналов

**Идеальное
внесение!**



Мануальные преимущества

Идеальное
внесение!

AH Temp™

Временный материал на основе гидроксида кальция для
корневых каналов с ультра тонкими, длинными и
предварительно изогнутыми AH Temp™ канюлями



- ✓ Быстро
 - Нет необходимости в замешивании
 - Прямое, точное внесение

- ✓ Просто
 - Предварительно смешанный, готовый к применению шприц
 - Легкое внесение, отсутствие дополнительных манипуляций

AH Plus Jet®

№1 эндодонтический силер¹ в шприце с
удобными насадками для внесения



- ✓ Надежно
 - Отсутствие заражения
 - Точное размещение пасты в корневом канале

Информация для заказа

AH Temp™ набор

4 x AH Temp™ шприца, 0.75 мл каждый
20 x AH Temp™ канюли
1x рукоятка
1x иллюстрированное
техническое руководство
1x инструкция

номер 606.20.123



AH Temp™

отдельные канюли

20 x AH Temp™ канюль
номер 606.20.124



Защитные чехлы

500 x защитных чехлов
номер A88013S1



AH Plus Jet® стартовый набор

1 x AH Plus Jet® шприц, 15 г
20 x смешивательных насадок
20 x внутриротовые канюли
1 x блокнот для замешивания
1 x иллюстрированное
техническое руководство
1 x органайзер

ReOrder 606.20.115



AH Plus Jet®

смесительные насадки/
внутриротовые канюли:
40 x смешивательных насадок с
внутриротовыми канюлями

номер 606.20.116



AH Plus Jet® шприц

2 x AH Plus Jet® шприца,
15 г

номер 606.20.118



К лучшей стоматологии

DENTSPLY

¹ Данные по запросу