

GC FujiIrock EP – стоматологический гипс 4 класса (стандарт ISO 6873), отличающийся улучшенными физическими свойствами и рабочими характеристиками.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Легко замешивается. Тиксотропен, т.е. сам по себе не очень текуч, но при вибрации текучесть резко возрастает.
Минимальное расширение при затвердевании позволяет получить точные модели с гладкими поверхностями.
FujiIrock EP имеет высокую прочность на сжатие, при извлечении из оттиска модель не сломается.
основе полисульфидной резины.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Количество воды на 100 г порошка 20 мл.
Рабочее время 8 мин.
Время затвердевания 12 мин.
Коэффициент расширения при затвердевании $\leq 0.09\%$
Прочность на сжатие 53 МПа

Метод тестирования: ISO 6873

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Рекомендованное соотношение вода/гипс 20 мл / 100 г.
2. Добавляйте порошок к воде в течение 10 секунд, затем начинайте замешивание. Замешивайте шпателем в течение 30- 60 секунд до получения однородной массы.
3. Залейте полученную массу в оттиск. Для получения модели без пористости настоятельно рекомендуется применять вибрацию.
4. Извлечение модели из оттиска производится (с момента заливки в оттиск): для гидроколлоидных слепков – через 30 минут; для полисульфидных или винилполисилоксановых слепков – через 40 минут.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Материал предназначен только для использования профессиональными стоматологами.
2. После открытия пакета пересыпьте его содержимое в емкость с крышкой.
3. Во избежание вдыхания мелкодисперсной пыли гипса при работе с ним используйте маску.
4. Следите, чтобы порошок не попал в глаза. Если это случилось, немедленно промойте глаза большим количеством проточной воды.
5. Во избежание попадания в глаза осколков гипса при обработке готовой модели используйте защитные очки.
6. После использования гипса плотно закрывайте емкость. Храните гипс в прохладном сухом месте. Продукт подвержен порче при хранении в условиях доступа воздуха, в частности из-за контакта с влагой.

ЦВЕТА

Выпускается в 4 цветах:

Белый жемчуг, Желтая пастель, Золотисто-коричневый, Бежевый топаз

РАСФАСОВКА

Белый жемчуг, Желтая пастель, Золотисто-коричневый, Бежевый топаз по 5 кг
Желтая пастель, Золотисто-коричневый по 12 кг

СРОК ГОДНОСТИ

3 года от даты изготовления.