

ФРИГЕНОЛ ТЕМПОРАРИ ПЭК

 [Перейти в магазин Эль Дент и заказать:](#) 

FREEGENOL TEMPORARY PACK

БЕЗЗВГЕНОЛЬНЫЙ ЦЕМЕНТ ДЛЯ ВРЕМЕННОЙ ФИКСАЦИИ

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Фиксация временных коронок и мостов.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

В редких случаях у некоторых пациентов наблюдалась повышенная чувствительность к материалу. В случае возникновения аллергических реакций необходимо прекратить использование материала и обратиться к врачу соответствующей специализации.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Выдавите на блок для замешивания полоски базы и катализатора одинаковой длины.
2. Тщательно замешайте их в течение 20-30 секунд.
3. Нанесите полученную пасту на внутренние поверхности (временной) коронки или моста, затем зафиксируйте коронку или мост на препарированный зуб. Поверхность зуба должна быть сухой.
4. После затвердевания (3 минуты от начала замешивания), удалите излишки материала.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Время затвердевания можно изменять путем смешивания базы и катализатора в разных пропорциях (больше базы – затвердевает быстрее, меньше базы – медленнее). Придерживайтесь диапазона соотношения база / катализатор от 3:2 до 2:3.
2. Если материал прилипает к зубу или металлу, можно добавить вазелин в количестве до 25% от общего объема смеси.

ХРАНЕНИЕ

Хранить при температуре 4-25°C (39.2 - 77.0°F).

(Срок годности: 3 года от указанной даты производства)

УПАКОВКА

Упаковка 1-1: 55 г базы, 20 г катализатора, очиститель и блок для замешивания.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При попадании в глаза немедленно промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу-офтальмологу.