



RU УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Гранулотек

Безэвгенольная, рентгенконтрастная паста (порошок + жидкость) для постоянной obturation инфицированных корневых каналов, в частности при наличии гранулемы.

Состав

(Пропорция: 1 часть порошка/1 часть жидкости)
Дексаметазона ацетат 0,1 %, Формальдегид, Фенол, Гваякол, Йодоформ, наполнитель

Свойства

Granulotec не содержит эвгенола, не рассасывается, обладает бактерицидными и рентгенконтрастными свойствами; применяется для постоянного пломбирования инфицированных каналов, после экстирпации пульпы и лечения корневых каналов, в частности, в присутствии гранулемы. Материал обеспечивает дезинфекцию каналов, резорбцию гранулемы и регенерацию периапикальных тканей. Кроме того, может применяться в качестве постоянной obturation неинфицированных (витальных) зубов.

Показания

- > постоянная obturation инфицированных корневых каналов, особенно при наличии гранулемы
- > постоянная obturation неинфицированных каналов корня зуба

Применение

1. Инфицированные зубы

- > Используйте традиционные методы для расширения и подготовки корневых каналов
- > Тщательно очистите канал и высушите перед применением Granulotec
- > Смешайте порошок и жидкость, чтобы получить пасту средней кремообразной консистенции

- > Внесите пасту в канал с помощью пастонаполнителя # 35, длиной 25 мм, вращая инструмент вперед и назад при постоянном движении в канале от коронки к апексу и назад. Эта техника простая и эффективная
- > Убедитесь, чтобы ввести пасту до апикального уровня и обеспечить контакт с гранулематозной тканью. Противопоказание: не обрабатывать зуб вблизи дентального нерва
- > По возможности произвести рентген-контроль через 3 месяца
- > В случае тяжелого инфицирования зуба, целесообразно после завершения obturation провести лечение антибиотиками и анальгетиками
- > Следует отметить, что зуб может быть болезненным в течение нескольких дней после лечения, эту боль можно купировать анальгетиками

2. Неинфицированные зубы

Применение материала по той же методике, исключая назначение антибиотиков.

3. Частный случай обнаружения сломанного инструмента при прохождении канала

В случае невозможности извлечь сломанный инструмент в апикальной трети корня зуба, в связи с апикальной инфекцией: Следует расширить канал до контакта с инструментом и заполнить это пространство с помощью Granulotec, лечебный эффект которого будет действовать за счет диффузии. Следует провести рентген-контроль через 1 год после лечения.

Предупреждение

Granulotec содержит химические вещества, которые могут быть токсичными при вдыхании или проглатывании. Контакт с кожей может вызвать раздражение, ожог или аллергию. При попадании в глаза, промыть проточной водой. При попадании внутрь, потребуйте, чтобы пациент выпил много воды. Проконсультируйтесь с врачом.

Хранение

Хранить при комнатной температуре от 5°C до 30°C, в месте защищенном от прямого света и влажности

Срок годности 3 года

Упаковка

Порошок 20 г + Жидкость 15 мл

Арт.

11571

- > только для профессионального применения в стоматологии
- > СДЕЛАНО В ШВЕЙЦАРИИ