

АЛЬВЕОЖИЛ

СЕ 0459

Гемостатическая хирургическая повязка

Состав



Пенгавар джамби, эвгенол, натрия лаурил сульфат, карбонат кальция, наполнитель.

Свойства

АЛЬВЕОЖИЛ является пастой, содержащей волокна Пенгавара, для альвеолярных повязок после удаления зуба. Паста обеспечивает гемостатический эффект путем плотного компрессионного наложения и защищает от инфицирования (альвеолита) благодаря своим защитным свойствам.

При внесении в лунку АЛЬВЕОЖИЛ быстро прилипает к стенкам альвеолы за счет волокнистой консистенции. Под действием движений языка повязка постепенно рассасывается, вмешательство врача при этом не требуется, и заживление раны происходит постепенно.

АЛЬВЕОЖИЛ легко наносится и не требует специального медицинского наблюдения за процессом заживления.

 [Перейти в магазин Эль-Дент и заказать:](#) 

Показания

АЛЬВЕОЖИЛ является пастой, используемой в качестве повязки при сухой лунке или в качестве постэкстракционной повязки после сложного травматического удаления зуба у пациентов, имеющих в анамнезе осложнения, связанные с сухой лункой.

Противопоказания

Противопоказано применение АЛЬВЕОЖИЛА пациентам, имеющим аллергию на входящие в его состав компоненты, а также при удалении временных зубов (у детей до 12 лет).

Запрещено применение препарата при обычном рутинном удалении.

Способ применения

Взять небольшое количество пасты (приблизительно 20 г) и осторожно ввести в подготовленную зубную лунку.

Не зашивать.

Предостережения и меры предосторожности

Пациенту должны быть даны наставления не полоскать рот в течение 24 часов после анульсии.

Не обрабатывать более 5 зубов за одно посещение.

Является Xi-раздражителем

- При попадании на кожу может вызвать сенсибилизацию.
- Может вызвать раздражение кожи
- Избегать контакта с кожей
- При работе пользоваться перчатками
- Остатки препарата и контейнер являются опасными для здоровья и подлежат надлежащей утилизации.

После использования немедленно закрыть крышку.

Упаковка

Банка 10 г пасты

РУ № ФСЗ 2011/09927 от 04/07/2011

Только для профессионального применения в стоматологии