

 [Перейти в магазин ЭльДент и заказать:](#) 

Кальцимол ЛЦ (Calcimol LC)

Разрешен к применению на территории
МЗ РФ № 2011/09580

Инструкция по применению

Описание материала:

Кальцимол ЛЦ – это светоотверждаемый, рентгеноконтрастный однокомпонентный материал, содержащий гидроксид кальция.

Область применения:

- Непрямое покрытие пульпы
- Прокладка под все пломбировочные материалы

Применение:

При работе с материалом необходимо следить за безупречной сухостью поверхности зуба и исключить загрязнения. При непосредственной близости пульпы (< 0,5 мм), а также для прямого покрытия пульпы, вместо **Кальцимол ЛЦ** рекомендуется использовать препарат на основе водного раствора гидроксида кальция.

Кальцимол ЛЦ можно вносить непосредственно из шприца. Чтобы гарантировать функциональность non-dropping-шприца, нельзя оттягивать назад его поршень во время и после завершения работы с материалом. Рекомендуется выдавить из тубы необходимое количество **Кальцимол ЛЦ** на блок для смешивания и апплицировать с помощью подходящего инструмента.

При толщине прокладки более 1 мм препарат следует наносить послойно и полимеризовать каждый слой минимум 20 секунд.

Если требуется достичь более высоких показателей сцепления (напр., при использовании **Кальцимол ЛЦ** в адгезивной технике пломбирования), перед аппликацией **Кальцимол ЛЦ** можно применять подходящий адгезив. Для этого требуется учитывать рекомендации производителя соответствующего адгезива.

Возможные избытки материала следует тщательно удалить подходящим инструментом перед началом полимеризации. Сполимеризованные излишки материала нельзя удалять с помощью зонда, для этого рекомендуется осторожно убрать их с помощью ротационного инструмента, а затем провести постановку пломбы согласно рекомендациям производителя пломбировочного материала.

Указания, меры предосторожности:

Кальцимол ЛЦ нельзя накладывать по краям пломбы. Края постоянной пломбы всегда должны граничить со здоровыми тканями зуба, соответственно подготовленными согласно адгезивной технике пломбирования.

Кальцимол ЛЦ склеивается с препаратами на основе метакрилатов (напр., К + В-материалы или временные пломбировочные материалы), а также с определенными оттискными материалами (напр., полиэфир), что может приводить к потере подкладки. В таких случаях рекомендуется наносить разделяющее средство (напр., вазелин, глицериновый гель). Перед постановкой постоянной пломбы изолирующий препарат следует снова удалить.

После взятия порции **Кальцимол ЛЦ** рекомендуется избегать прямых лучей света (операционный светильник, солнечный свет) и по возможности быстро провести аппликацию материала.

Кальцимол ЛЦ содержит метакрилаты, ВНТ и амины. При наличии повышенной чувствительности (аллергии) к данным компонентам **Кальцимол ЛЦ**, следует отказаться от его применения. Гидроксид кальция оказывает разъедающий эффект на кожу и слизистые оболочки, необходимо избегать какого-либо контакта с глазами.

Фенольные субстанции, особенно эвгенол- и тимолсодержащие препараты, приводят к нарушениям полимеризации **Кальцимол ЛЦ**. Поэтому следует избегать использования цинкоксид-эвгенольного цемента или других эвгенольных материалов в сочетании с **Кальцимол ЛЦ**.

Световод фотополимеризационной лампы следует располагать как можно ближе к поверхности пломбы, иначе наступит недостаточная глубина отверждения пломбы. Недостаточное отверждение может приводить к потере прочности пломбы и возникновению жалоб у пациента.

Хранение:

Хранить при температуре 4 °С - 23 °С в сухом, защищенном от света месте. До начала использования шприц необходимо хранить в невскрытой алюминиевой упаковке. После вскрытия упаковки материал следует использовать в течение 6 месяцев и до истечения срока годности. В промежутках между работой шприц следует хранить плотно закрытым с помощью колпачка.

Наши препараты разработаны для использования в стоматологии. Поскольку речь идет о применении поставляемых нами препаратов, наши устные и/или письменные указания, а также наша консультация, являются абсолютно честными и ни к чему не обязывающими. Наши указания и/или консультация не избавляют Вас от того, чтобы проверять поставляемые нами препараты на их пригодность к использованию в задуманных целях. Поскольку применение наших препаратов проводится без нашего контроля, ответственность за это ложится исключительно на Вас. Разумеется, мы гарантируем соответствие качества наших материалов действующим нормам, доставку и условия торговли – установленным стандартам.