

Разрешен к применению  
ФС № 2011/09580

## Инструкция по применению

### Описание материала:

**Кальцимол** представляет собой самотвердеющую, рентгеноконтрастную пасту на основе гидроокиси кальция.

### Область применения:

**Кальцимол** служит для непрямого покрытия пульпы и в качестве прокладки под стоматологические пломбировочные материалы.

### Применение:

На блоке для смешивания или на стеклянной пластине смешать в течение 10 с одинаковые по длине порции базисной и катализаторной паст **Кальцимол** (соотношение смеси 1,2 : 1 г/г) до получения массы однородной консистенции и равномерного цвета. Смешивание не должно быть длительным!

Приготовленную пасту **Кальцимол** как можно быстрее внести в полость.

Работать с пастой **Кальцимол** при комнатной температуре (15 °C - 23 °C).

При комнатной температуре паста **Кальцимол** пригодна для работы в течение 2 минут и связывается в полости рта в течение 2 - 4 мин. Повышенные температура и влажность воздуха ускоряют процесс связывания и сокращают время работы с материалом, так что во рту затвердевание происходит быстрее.

### Указания/меры предосторожности:

**Кальцимол** содержит гидроокись кальция, салицилат, вольфрамат кальция, N-этилтолуолсульфонамид. При наличии повышенной чувствительности (аллергии) к данным компонентам **Кальцимол**, следует отказаться от его применения. Перед наложением пломбы дождаться полного отверждения препарата. Это необходимо с целью достижения достаточной стабильности для постановки пломбы. Не использовать **Кальцимол** в качестве временной пломбы или отдельной прокладки, несущей жевательную нагрузку. При низких температурах происходит уплотнение катализатора, поэтому перед применением необходимо выдержать его некоторое время при комнатной температуре или, если возможно, на короткое время подогреть до  $\approx 40$  °C.

**Кальцимол** имеет выраженное щелочное действие, поэтому следует избегать его контакта с глазами (слизистой оболочкой). По возможности избегать контакта со средствами для травления (растворимость).

### Хранение:

**Кальцимол** хранить при комнатной температуре (15 °C - 23 °C).

Тубы после применения плотно закрывать и колпачки местами не менять! Избегать попадания влаги.

После истечения срока годности материал больше не применять.

Наши препараты разработаны для использования в стоматологии. Поскольку речь идет о применении поставляемых нами препаратов, наши устные и/или письменные указания, а также наша консультация, являются абсолютно честными и ни к чему не обязывающими. Наши указания и/или консультация не избавляют Вас от того, чтобы проверять поставляемые нами препараты на их пригодность к использованию в задуманных целях. Поскольку применение наших препаратов проводится без нашего контроля, ответственность за это ложится исключительно на Вас. Разумеется, мы гарантируем соответствие качества наших материалов действующим нормам, доставку и условия торговли - установленным стандартам.