

Кариес Маркер (Caries Marker)

Инструкция по применению

Разрешен к применению на территории

№ ФСЗ 2009/05712

Описание материала:

Кариес Маркер содержит цветовой индикатор (кислотный краситель красного цвета) для окрашивания инфицированного кариозного дентина.

Таким образом **Кариес Маркер** позволяет визуальное контролировать наличие кариозных участков. Здоровый, а также неинфицированный, способный к реминерализации дентин не окрашивается. Это позволяет выполнить щадящую экскавацию. Неинфицированный (неокрашенный) дентин должен быть максимально сохранен.

Показания к применению:

Кариес Маркер используется с целью окрашивания кариозных тканей зуба:

- для определения оставшихся кариозных участков после удаления видимого кариеса
- для четкого разграничения кариозного и здорового дентина, особенно отличающегося по цвету вторичного дентина
- для контроля результатов удаления кариозного дентина
- для обнаружения кариеса в участках зуба с затрудненным визуальным контролем
- для демонстрации пациенту кариозных участков
- в целях обучения (на удаленных зубах)
- для распознавания облитерированных корневых каналов
- для обнаружения микротрещин в пломбах и на пограничных участках

Указания по применению:

Сначала удалить размягченный и сильно окрашенный дентин.

Полость обработать **Кариес Маркером**, оставить для воздействия на 5 - 10 секунд (не больше!) и затем промыть водяным спреем. Жидкость лучше всего наносить с помощью поролонового шарика **Пеле Тим**.

Кариозный дентин окрашивается в интенсивный красный цвет.

Окрашенные участки дентина необходимо полностью удалить, при этом тщательно оберегая неокрашенные зоны. Повторять процедуру до тех пор, пока дентин не перестанет окрашиваться.

Зубной налёт и остаточный кариес эмали зуба под воздействием **Кариес Маркера** также приобретают красный цвет и подлежат удалению.

Указания, меры предосторожности:

Интенсивность окрашивания может быть усилена путем кратковременного просушивания полости.

Окрашивание не должно проводиться длительно (не больше 10 с), краситель должен быть полностью удален путем тщательного промывания, иначе есть опасность окрашивания и последующего удаления здорового дентина.

Не применять на участках непосредственной близости к пульпе - это опасно из-за риска перепутать окрашенные реагентом кариозные области с пульпой (тоже розоватого цвета).

Избегать контакта с кожными покровами и одеждой (опасность окрашивания). Удалять с одежды с помощью слабого раствора уксуса (сначала проверить, не линяет ли одежда!)

Кариес Маркер содержит пропиленгликоль. Неразбавленный **Кариес Маркер** при попадании на слизистые оболочки может вызывать их раздражение у чувствительных пациентов. При наличии повышенной чувствительности (аллергии) к данным компонентам **Кариес Маркер**, следует отказаться от его применения.

Хранение:

Хранить при 4 °C - 23 °C.

После истечения срока годности препарат больше не применять.

Наши препараты разработаны для использования в стоматологии. Поскольку речь идет о применении поставляемых нами препаратов, наши устные и/или письменные указания, а также наша консультация, являются абсолютно честными и ни к чему не обязывающими. Наши указания и/или консультации не освобождают Вас от проверки поставляемых нами препаратов на их пригодность к использованию в соответствующих целях. Поскольку применение наших препаратов проводится без нашего контроля, ответственность за это ложится исключительно на Вас. Разумеется, мы гарантируем, что качество наших препаратов отвечает существующим нормам, а также стандартам, указанным в наших общих условиях продажи и поставок.